

# Pro ephy®

## MASQUES CHIRURGICAUX Non tissé

### TYPE II EN 14683 : 2014 3 PLIS

Efficacité de Protection > 98 %  
Usage unique



### > Utilisation

Masques de Type II selon la norme EN 14683-2014 relative aux masques chirurgicaux. Milieu hospitalier en général, centre de soins.

- Masque à haute filtration, couvre la bouche, le nez et le menton.
- Porté par la personne contagieuse, il prévient la contamination de l'entourage et de l'environnement.
- Porté par le soignant, le masque prévient la contamination du patient et de son environnement (air, surfaces, produits,...).
- Protège contre les agents infectieux transmissibles par voie « gouttelettes ».
- Durée d'utilisation : 3 heures.

### > Mode d'emploi

Masque à utilisation courte et à usage unique.

Lavez-vous les mains avant de porter un masque.

Tenez les lanières avec les deux mains et couvrir le nez, la bouche et le menton.

Ajuster la barrette nasale sur le nez et bien la serrer.

Assurer l'étanchéité sur le nez, la bouche et le menton.

Jeter après utilisation.

### > Caractéristiques

- Matière :
  - complexe très haute filtration non tissé 3 plis, dont 1 filtre en microfibre.
  - face externe bleue en spunbond polypropylène.
  - face interne blanche hypoallergénique en thermobonded polypropylène.
- Filtre : ..... 100 % microfibre de polypropylène sans fibre de verre.
- Barette nasale : ..... antibuée incorporée.
- Liens : ..... polyester, fixations auriculaires.
- Agent liant : ..... d'origine acrylique.
- Dimensions : ..... longueur à plat : 175 mm x largeur à plat : 95 mm.
- Résistance aux éclaboussures : ISO22609:2004
- Respirabilité (Pression différentielle) : EN14683:2019 Annexe C < 40 Pa/cm<sup>2</sup>
- Efficacité de la filtration bactérienne : EN14683:2019 Annexe B < 98 %
- Tolérance : ..... +/- 2 %.
- Poids : ..... 5,1 g

Conforme à la directive Européenne 90/128/CEE.

Références normatives : Testé selon la norme EN 14683 : 2014 Annexe B et C.

Classification Type II. Efficacité de filtration bactérienne (EFB) :

- Efficacité de protection > 98 %

- Responsabilité < 29,4 Pa

Certification TUV



### > Précautions d'emploi

Ce masque est un masque à usage unique à ne pas réutiliser et à ne pas conserver autour du cou. Durée d'utilisation recommandée : 4 heures.

Date de péremption : 3 ans après la date de fabrication.

A stocker dans un endroit sec et ventilé.

### > Logistique

Masque	
Conditionnement	boîte de 50 pcs
Colis	2000 pcs (40 bts x 50 pcs)
Colis dimensions extérieures (cm)	52 x 38 x 34 H
Poids brut	8,1 kg
Code produit	343033

Tolérance maxi de 5 %. Ces informations, données à titre indicatif, sont le reflet de nos meilleures connaissances. Elles ne sauraient en aucun cas engager notre responsabilité. Photos non contractuelles.